

## Abfrage der Seriennummer Ihres Dongles über DentalCAD, ChairsideCAD oder exoplan (aktiviert)

1. Stecken Sie den Dongle in Ihren PC oder Laptop ein.

2. Starten Sie die Anwendung *DentalCAD*  
../DentalCADApp/bin/DentalCADApp.exe



oder *ChairsideCAD*  
../ChairsideCAD/bin/DentalCADApp.exe

oder *exoplan*  
../ImplantPlanning/bin/ImplantPlanning.exe

3. Klicken Sie im Hauptmenü auf der rechten Seite auf  
die Schaltfläche **Tools**.

4. . Klicken Sie auf **About**.

5. Klicken Sie auf **Copy**, um die Seriennummer in die  
Zwischenablage zu kopieren.

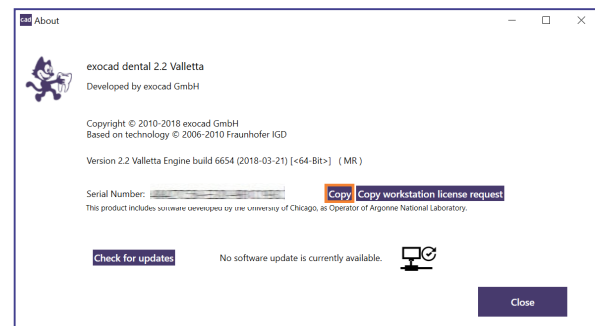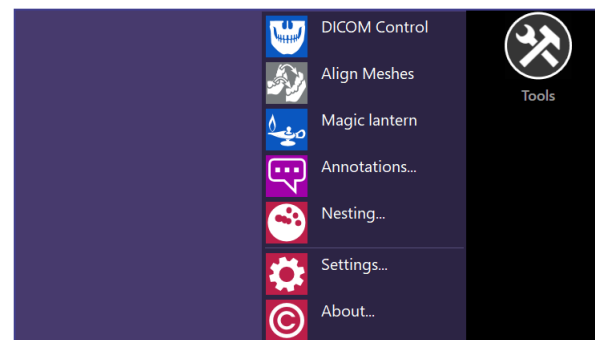

## Abfrage der Seriennummer Ihres Dongles über DentalCAD, ChairsideCAD oder exoplan (noch nicht aktiviert)

1. Stecken Sie den Dongle in Ihren PC oder Laptop ein.
2. Starten Sie die Anwendung *DentalCAD*  
../DentalCADApp/bin/DentalCADApp.exe  
  
oder *ChairsideCAD*  
../ChairsideCAD/bin/DentalCADApp.exe  
  
oder *exoplan*  
../ImplantPlanning/bin/ImplantPlanning.exe
3. Es erscheint ein Dialogfenster, in dem Sie dazu aufgefordert werden, die Software zu aktivieren. Ihre Seriennummer wird in diesem Fenster angezeigt.
4. Drücken Sie **STRG** und **C**, fügen Sie den Text in ein beliebiges Dokument ein und kopieren Sie die Seriennummer.

